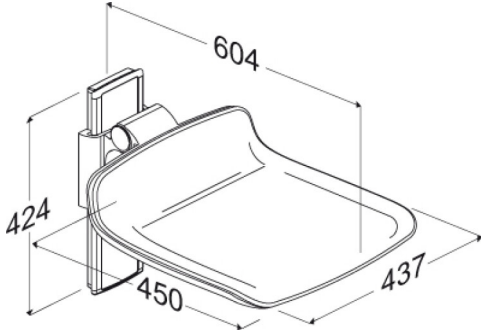




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, manuellt höjddreglerbar R7410112000
Färg	VVS: 777535000 NRF: 6311154 EAN: 5708590311159 HMI: 71803 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Vit
Beskrivning	 PLUS duschsits 450, uppfällbart. Höjddreglerbart 220 mm, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Exkl. monteringskruvar. PLUS duschsits 450, uppfällbart. Höjddreglerbart 220 mm, utan användning av verktyg. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Exkl. monteringskruvar.
Justerbar Höjjustering Produktkapacitet	Höjddreglerbar 220 mm Max brukarvikt: 200 kg När duschsitsen belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 47 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 1,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Material Ergonomi Funktioner Garanti	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på sätet är förseglade med ändpluggar i ABS. Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Sits kan fällas upp mot väggen efter användning. Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 450, manuellt höjreglerbar
Varunummer	R7410112000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

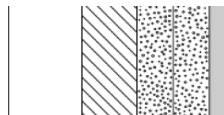
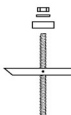
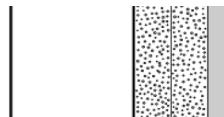
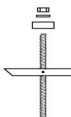
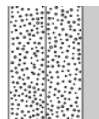
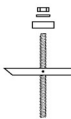
Product	PLUS duschsits 450, manuellt höjdglerbar
Varunummer	R7410112000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450, manuellt höjdglerbar R7410112000			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			

pressalit.com